


Envoi manuel des données thérapeutiques

Appareil : Prisma Smart Max

Conditions requises :

- L'appareil doit être en mode veille.
- Le mode avion doit être désactivé.

Procédure :

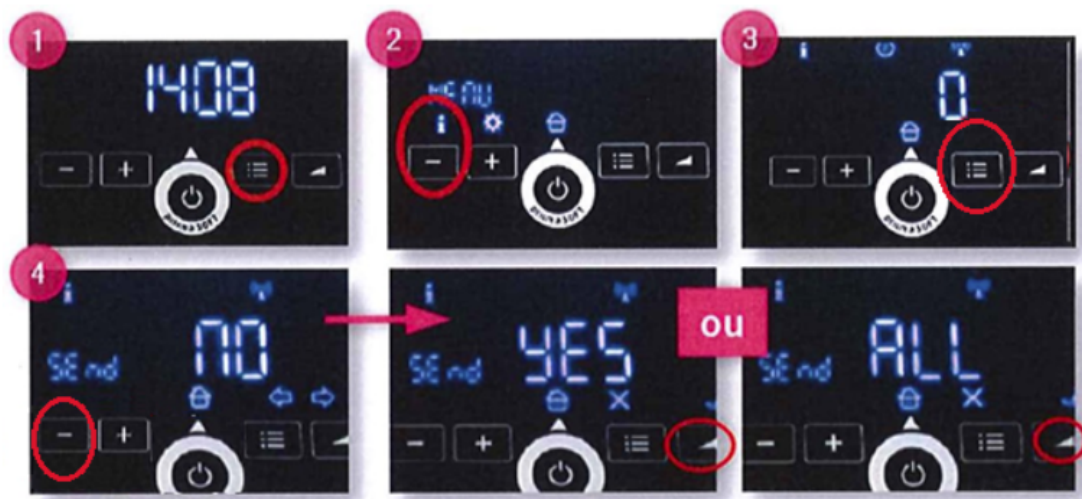

SEND NO

= aucun envoi

SEND YES

= envoi de toutes les données depuis la dernière transmission

SEND ALL

= envoi de toutes les données contenues dans la machine


5- Le mot **connEct** s'affiche sur votre écran :

- Reconnaissance du modem
- recherche du réseau



6 - Envoi des données en cours

6

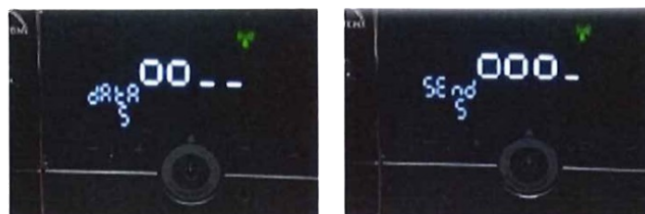

7- Si vous voyez cet écran, l'envoi des données est terminé avec succès !

7



En cas de message d'erreur à l'étape 7, voici la signification des principaux codes :



- **623 ou 629:** Aucun réseau GSM détecté. Veuillez déplacer l'appareil vers une zone avec une meilleure couverture.
- **624:** Le serveur est momentanément indisponible. Les données seront transmises automatiquement dès que la connexion sera rétablie.
- **Autres codes d'erreur :** veuillez en prendre note et contacter notre service au 09.69.32.21.05 afin que nous puissions vous apporter l'assistance nécessaire.

Remarque : Le résultat des étapes précédemment décrites n'a aucun impact sur l'efficacité de votre appareil