



Guide de paramétrage Wi-Fi.


Connexion à votre réseau local

Pour permettre la connexion à votre réseau local :

1. Tourner le bouton situé sur le devant de l'appareil de thérapie
2. Naviguer jusqu'au menu « Mes réglages »
3. Sélectionner « Wi-Fi »




Ecran « Mes réglages »

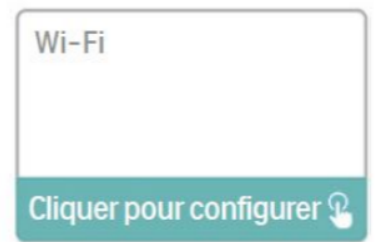

Ecran réglages Wi-Fi

L'accessoire « **Wi-Fi** » cherche ensuite les **réseaux disponibles à portée de votre appareil** :

- sélectionner **votre réseau** (nom de votre box) quand il s'affiche à l'écran.
- **valider** en appuyant sur le bouton rotatif.

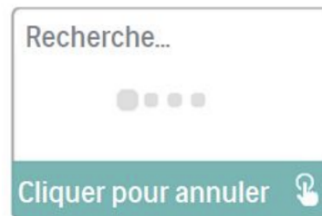

Ecran animé Mise à jour



Ecran réseaux Wi-Fi disponibles

Vous arrivez sur « **l'écran Clé réseau** » :


- entrer le **mot de passe réseau** (clé Wi-Fi ou clé de sécurité)
- puis **sélectionner** la coche vert

Remarque "*Ecran Clé réseau*" : La rangée du bas permet d'utiliser les minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour supprimer un caractère, mettez-le en surbrillance et sélectionnez « X ».



Ecran Clé réseau

ou

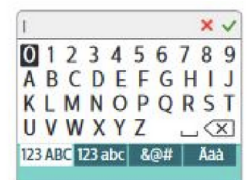

Ecran de saisie de ma clé de sécurité Wi-Fi

Dernière étape :

- la connexion peut prendre plusieurs secondes
- se confirme à l'écran lorsqu'elle est terminée.



Ecran animé Connexion



Ecran Connexion établie

Une fois la connexion établie, le nom du réseau et l'intensité du signal s'affichent sur l'écran Wi-Fi.



Attention : En cas de changement de Fournisseur d'Accès à Internet, ou de code Wi-Fi, il est impératif de ressaisir la nouvelle clé pour associer la box Wi-Fi à l'appareil.