



Memo sécurité à respecter avec votre oxygénothérapie



Ne pas fumer, ne pas vapoter




Ne pas approcher d'une flamme
Ne pas cuisiner avec une gazinière, un barbecue




Ne pas utiliser d'aérosol




Ne pas appliquer de corps gras sur le visage

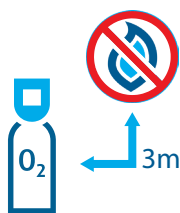


3 mètres entre une flamme
et votre source d'oxygène

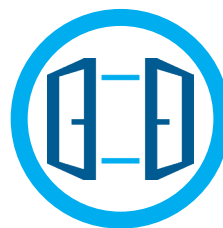

Aérer la pièce de stockage

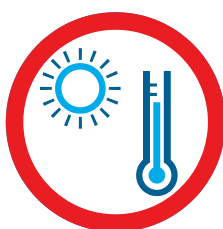

Attention aux fortes chaleurs
Ne pas stocker d'oxygène dans votre véhicule

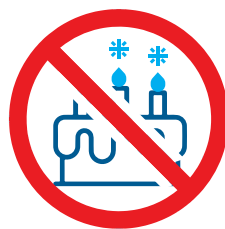

Étincelles = danger
(bricolage, bougies-étincelles....)



Ne pas graisser
Ne pas tenter de réparer les dispositifs médicaux



Respecter la prescription médicale